

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Orlickoústecká nemocnice
Oddělení lékařské mikrobiologie

Vysvětlivky:

- * Odběry na bioch. a hem. vyšetření + výtěry z krku, nosu, nosohltanu, dutiny ústní, laryngu, zevního zvukovodu, recta, na OLM v Žamberku totéž + sputum
- ** Teplota pacienta (nutné u hospitalizovaných)

Odběrové pomůcky:

- A Tampon odběrový pro zpracování do 2h, červený uzávěr, dop. Dispolab, kat.č.: 1652
- AD Tampon odběrový pro zpracování do 2h, na drátku, dop. Dispolab, kat.č.: 1660
- C Tampon odběrový pro zpracování do 48h, transportní půda, dop. Dispolab, kat.č.: 1601
- E Tampon odběrový pro zpracování do 48h, transportní půda, dop. Dispolab, kat.č.: 1611 – vhodné pro ORL
- G Zkumavka s gelem, červený uzávěr, dop. Greiner, kat.č.: 454071 (4ml)
- HK Kultivační médium pro aerobní mikroorganismy, modrá barva, kat.č.: BacT/ALERT SA
Kultivační médium pro anaerobní mikroorganismy, oranžová barva, kat.č.: BacT/ALERT FN
Kultivační médium pro aerobní a fak. anaerobní mikroorganismy, žlutá barva, kat.č.: BacT/ALERT PF
- CH Tampon dakronový pro odběr chlamydií, ženy - dop. Dispolab, kat.č.: 1648, muži – dop. Dispolab, kat.č.: 1647
- I Injekční stříkačka pro anaerobní odběr materiálu, 5 ml (10 ml), po aspiraci materiálu nutno použít uzávěr pro zabránění přístupu vzduchu
- LP Lepicí páska Lepex
- NG Kultivační médium speciální, dodává laboratoř
- R Tampon odběrový speciální, dop. Dispolab, E-SWAB souprava, kat.č.: 1622
- S Zkumavka sterilní pro odběr sputa nebo moče, dop. Dispolab, kat.č.: 1211, event. 1080 (sterilní kontejner FLEX-TAINER)
- TV Tampon odběrový, dop. Dispolab, kat.č.: 1652, transportní a kultivační médium pro Trich. vaginalis dodává laboratoř
- ZS Zkumavka sterilní, červený uzávěr, dop. Dispolab, kat.č.: 1028

Vysvětlivky k preanalytické fázi u jednotlivých vyšetření:

T₁₂₀ Odebraný materiál doručit do laboratoře do 2h

- 1 Vyšetření se provádí u dětí do 5-ti let
- 2 Odebírají se vždy 2 lahvičky (aerobní+anaerobní m.). Kultivační médium před odběrem musí mít pokojovou teplotu, před odesláním do laboratoře uchovávejte při pokojové teplotě
- 3 Vhodné doplnit anamnesu – průjem, kontakt s konkrétním patogenem (salmonely, shigely, campylob. ...), cestovatelská anamnesa, preventivní vyšetření
- 4 Odběr ráno (před defekací a hygienou) nalepením a opětným sejmutím průhledné lepicí pásky na konečnickové řasy
- 5 Při vyšetření materiálu na mykobakterie je nutné **vždy** uvést adresu bydliště pacienta!
- 6 Při požadavku anaerobní kultivace připište na žádanku k materiálu
- 7 Tampon po odběru zalomit do speciálního kultivačního média a transportovat do laboratoře